



## Owlet Cam Kullanım Kılavuzu

Cam Ayarları

Çevrimiçi olma | Kurulum

---

Cam'inızı Görüntüleme ve Kullanma

---

Cam Bildirimleri ve Video Klipler

---

Cam Ayarları | Bilgi

---

Ek

## Owlet Cam Ayarlarını Yapma

Kullanım kılavuzunun bu bölümü Cam'ınızı ayarlamanıza, çevrimiçi hale getirmenize ve kurmanıza yardımcı olacaktır.

### Çevrimiçi Olma

Owlet Cam'ınızı, bebek odasına fiziksel olarak kurmadan önce Owlet Uygulaması'nda ayarlamanızı öneririz.

#### Başlamadan önce:

1. Cam yalnızca 2,4 Ghz bağlantı üzerinden bağlandığı için kablosuz ağınızın 2,4 Ghz olduğunu doğrulayın.
2. Wi-Fi şifrenizi bildiğinizden emin olun.



En son Owlet Uygulaması'nı indirin ve henüz hesabınız yoksa bir hesap oluşturun.

Add a Device (Cihaz Ekle) seçeneğini belirleyin ve ardından Cam ögesini seçin.

Cam'ınızın ayarlarını yapmak için talimatları izleyin.

Ayarlama işlemini başarıyla tamamlayamıyorsanız aşağıdaki hata kodlarını kontrol edin.

#### OC 20

Bu hatayı görürseniz Cam'daki LED'indurumuna bakın.

#### Mavi renkte mi yanıp sönüyor?

Lütfen aşağıdakileri kontrol edin:

- Wi-Fi ağı adının ve parolasının doğru girildiğinden emin olun.
- Mobil cihazınızın, Cam'ın bağlanmasını istediğinizle aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
- Wi-Fi ağınızın 2,4 GHz olduğundan emin olun. Cam şu anda 5 GHz'ı desteklememektedir.

#### Kesintisiz şekilde mavi mi yanıyor?

- Ayarlama işleminin başında Cam'ı seçtiğinizden emin olun ve lütfen tekrar deneyin.

#### OC 22, OC 23, OC 24, OC 25

Bu hatalardan herhangi birini görürseniz Cam'ınız ayarlama işlemi sırasında bir hatayla karşılaşmıştır. Bu durumda ayarlamayı tekrar denemeniz gerekir. Bu hatayı tekrar tekrar görüyorsanız lütfen ek yardım için Müşteri Desteği ile iletişime geçin.

+1 884-334-5330  
contact@owletcare.com

## Cam'ınızı kurma


Cam, kuş bakışı veya düz bir yüzeye olmak üzere iki farklı şekilde kurulabilir ve monte edilebilir.

*Cam'ı ve tüm kabloları bebek yatağının kenarından en az 92 cm (36 inç) uzağa yerleştirin. Bebek yatağına 92 cm'den (36 inç) daha yakın olan kabloların üstü kapatılmalıdır.*



① **Manyetik tabanı kullanarak** cihazı düz bir yüzeye yerleştirin ve dilediğiniz açıda ayarlayın.

② **Bebek yatağının kuşbakışı görünümü veya bebek odanızın daha geniş bir görünümü için** tabanı duvara montaj aparatı olarak kullanarak bebek yatağının üzerindeki bir duvara monte edin.

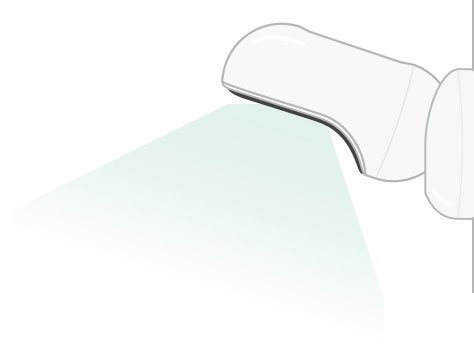

Sonraki adımlar, Cam'ı duvara (bebek yatağının üzerine) monte etme konusunda size rehberlik edecektir.

*Dilerseniz [support.owletcare.com](http://support.owletcare.com) adresinden Kurulum Videomuzu da görüntüleyebilirsiniz.*

# Kutunun İindekiler



Owlet Cam



Owlet sarğılı kablolar\*  
ve oda sıcaklığı ile nem sensörü




Manyetik taban




Güç adaptörü

## Duvara Montaj Kiti

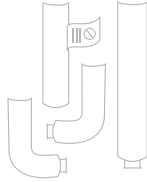

21 adet kablo  
koruması

18 adet uzun koruma  
1 adet uç parçası  
2 adet L braket

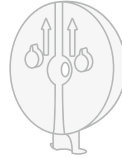

Montaj  
plakası



1 adet vida

## Cam'ı Monte Etmek İin Gerekten Aralar



Şerit metre  
(dahil değildir)




Küük Phillips yıldız tornavida  
(dahil değildir)

## ① Ölçün ve işaretleyin


Bebeğinizin yatağının üst kısmından 92 cm (36 inç) ölçerek duvara bir işaret koyun. Cam'ın monte edileceği yer burasıdır. En iyi görüntüleme açısı için bu işareti bebeğinizin yatağını ortalayarak yerleştirin.

**Hangi prizi kullanacağınızı belirleyin.** Bebeğinizin erişebileceği yerlerde açık kabloların bulunmamasını sağlamak için priz ile bebek yatağı arasında en az 92 cm (36 inç) olmalıdır. Sonraki adımlarda kabloların üzerinin nasıl kapatılacağıyla ilgili talimatlar açıklanmaktadır.

Sıcaklık ve nem sensörünün yerinin belirlenmesi de önemlidir. Sensör, akıllı kablunun güç adaptörüne bağlandığı kısmın uç tarafında yer alır. Odanın genel konfor seviyeleri hakkında daha doğru ölçümler elde etmek için sıcaklık sensörünün doğrudan bir ısı veya havalandırma deliğinin üzerinde olmaması sağlanmalıdır.

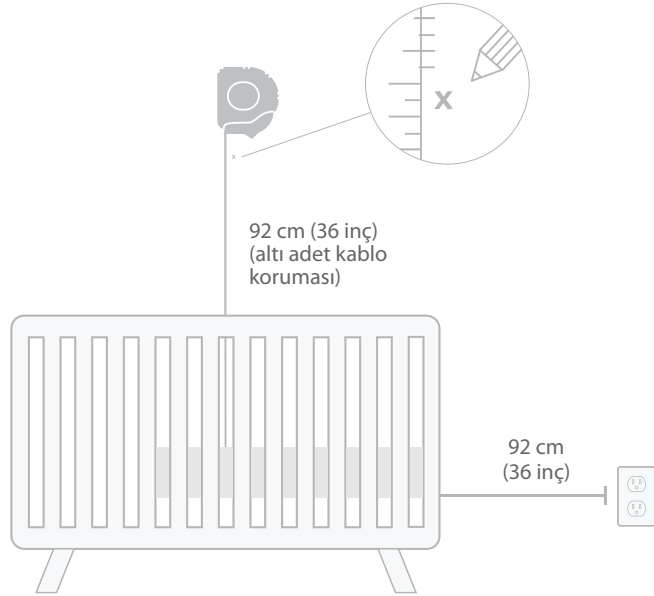

## ② Hizalayın ve sabitleyin

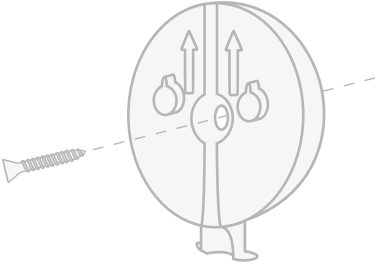


Montaj plakasının orta deliği ile duvara koyduğunuz işaret aynı hizada olmalıdır. Verilen vidayı kullanarak montaj plakasını **oklar yukarı bakacak şekilde duvara sabitleyin.**

## ③ Sarılı kabloyu açın ④ Kabloyu geçirin




Kablo sargılarını çıkarın ve sarılı kabloyu açın.

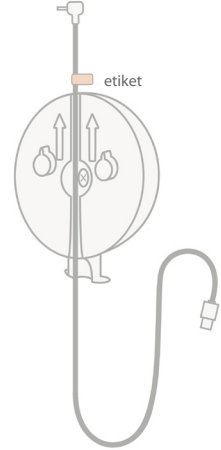


Kablonun üzerindeki turuncu etiketi montaj plakasının üst kısmına hizalayarak, kabloyu montaj plakası kanalından aşağı doğru geçirin.

## ⑤ Tabanı monte edin ⑥ Cam'ı takın

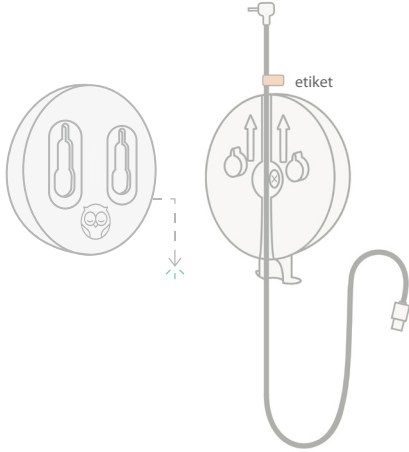

Manyetik tabanın büyük deliklerini, montaj plakasının üstündeki çıkıntılara yerleştirip tık sesi duyulana kadar aşağı kaydırın.

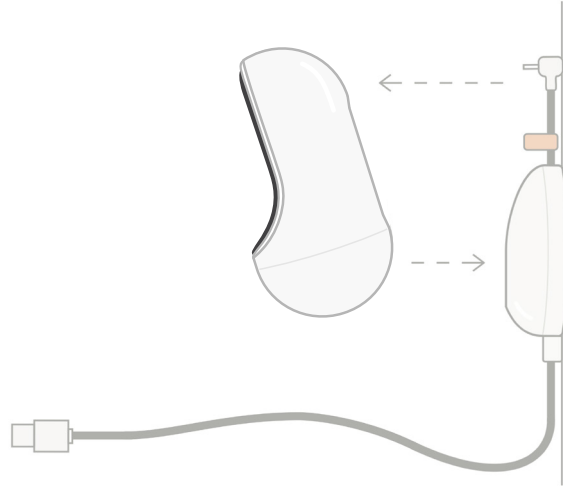

Cam'ı manyetik tabana takın.  
Kabloyu Cam'a bağlayın.


**Turuncu etiket, montaj plakasının hemen üzerine yerleştirilmelidir. Böylece Cam'ı istediğiniz açıda konumlandırmak için yeterli kablo boşluğuna sahip olursunuz.**

## ⑦ Kablo korumalarını monte edin

*Kablo korumalarında yüksek mukavemetli yapıştırıcı kullanılır. Doğru şekilde yerleştirmek için kurulumu acele etmeden tamamlayın.*

- ① Uzun korumanın arkasındaki yapışkan kapağı çıkarın
- ② Kabloyu uzun korumanın ortasından aşağıya doğru geçirin
- ③ Uzun korumayı montaj plakasının altına takın
- ④ Duvarın üzerine sıkıca bastırın
- ⑤ Duvar prizinin yüksekliğine ulaşincaya kadar, kalan uzun korumaları kullanarak 1-4 arasındaki adımları tekrarlayın.

uzun koruma

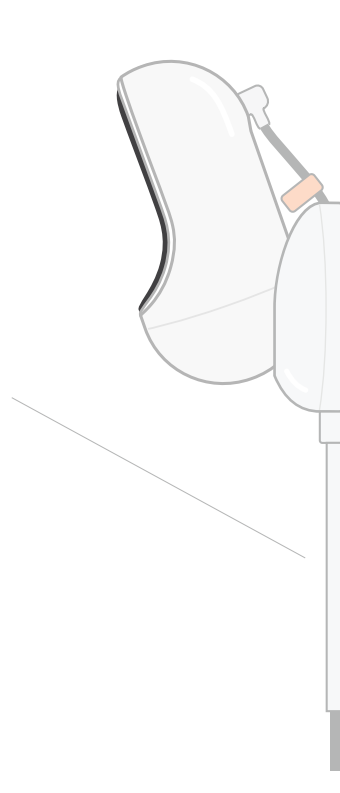




## ⑧ L braketi monte edin

Sağ veya sol L braketi kullanarak kabloyu duvar prizi yönünde yönlendirin.

Bebek yatağı kenarının 92 cm (36 inç) yakınında olan tüm kabloların üzeri kapatılana kadar uzun korumaları takın. Prize ulaşılan kadar uzun korumaları eklemeye devam edin. Son olarak duvar prizinin 15-25 cm (6-10 inç) yakınına geldiğinizde uç parçasını takın (böylece kablo fazlalığının cırt cırtlı bantla sarılması için yeterli alan bırakılır).



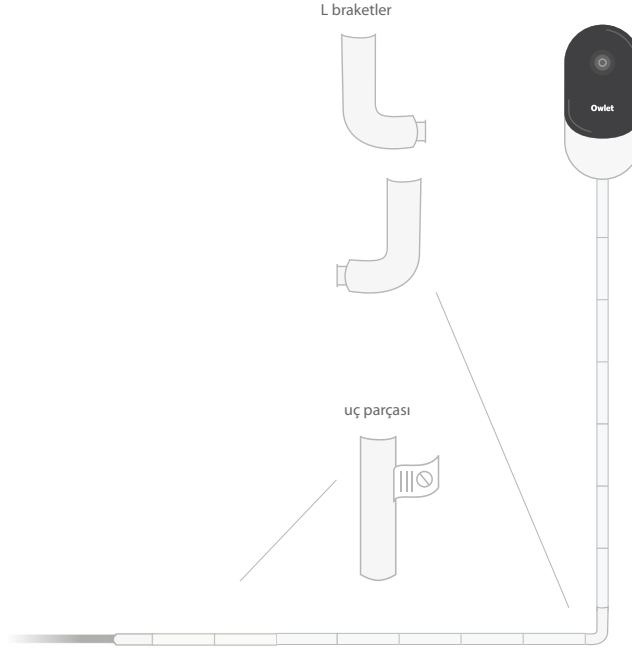


## ⑨ Kablo fazlalığını cırt cırtlı bantla sarın

Kablo fazlalığını halka şeklinde dolayın. Kablo sargısını ilk delikten geçirerek halkanın üst kısmını sabitleyin. Owlet logosu dışa bakmalıdır. Kablo sargısını ikinci delikten geçirerek halkanın alt kısmını üst kısmına sabitleyin (Bu noktada halka kurdele gibi görünmelidir). Kablo sargısının kalan kısmını da dolayarak sabitleyin.

Kablo fazlalığı güvenli bir şekilde sarıldıktan sonra güç kablosunu güç adaptörüne bağlayıp prize takın.

**Artık hazırsınız! Şimdi uygulamayı referans olarak kullanarak istediğiniz görünümü elde edene kadar Cam açısını ayarlayabilirsiniz.**

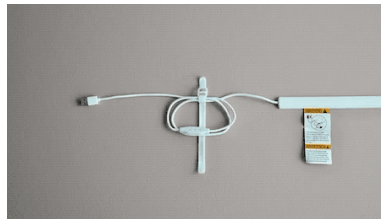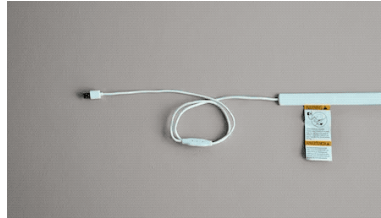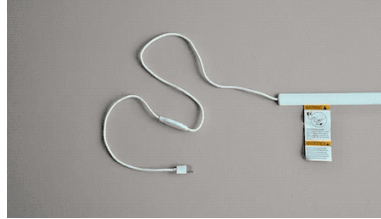

## Yardıma Mı İhtiyacınız Var?

Bölgenize özel iletişim bilgileri için lütfen şu adresi ziyaret edin:

<https://support.owletcare.com>

# Owlet Cam'ınızı Uygulamada Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kullanım kılavuzunun bu bölümü, Cam'ı ve Uygulama içindeki tüm cihaz özelliklerini nasıl kullanacağınızı anlamanıza yardımcı olacaktır.

## Cam Ana Ekranı

Cam akışınızı iOS veya Android cihazlarda görüntüleyebilirsiniz. Aynı anda en fazla 4 cihaz akış gerçekleştirebilir.

- [ ] simgesini seçerek veya telefonunuzu yatay yöne döndürerek görünümü tam ekran görüntüleyebilirsiniz.
- Ekranı iki kez dokunarak veya parmaklarınızı kıştırıp açarak ekranı 4 kata kadar yakınlaştırabilirsiniz.

## 2 Yönlü Konuşma

Başka bir odadayken çocuğunuzla konuşmak için bu özelliği kullanın.



### Düğme - AÇIK


Çocuk sizi duyabilir (mikrofonun yeşil bir arka planı vardır)

Bu özelliği etkinleştirdiğinizde Cam'den gelen sesi duyamazsınız. Bu nedenle konuşmadığınız zamanlarda düğmeye tekrar bastığınızdan emin olun.



### Düğme - KAPALI

Çocuk sizi duyamaz

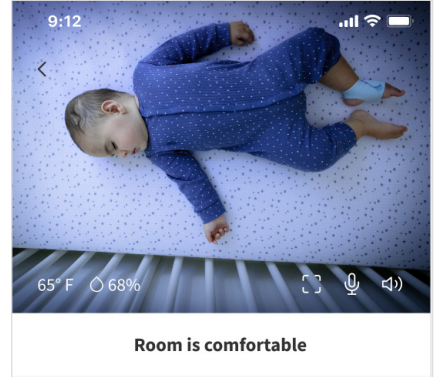

## Ses Seçenekleri



### Açık

Owlet Uygulaması açıkken bebeğinizin odasından gelen sesi duyabilirsiniz. Başka sekmeye geçtiğinizde veya Uygulamayı kapattığınızda, bebeğinizin odasından gelen sesleri duyamazsınız.



### Kapalı

Burada "off" (kapalı) seçeneğini belirlerseniz Cam'den gelen sesi duyamazsınız. Video akışı devam eder.




### Arka Plan Sesi

Bu seçenek belirlendiğinde, Uygulamanız kapalıyken veya cihazınızı başka bir şey için kullanıyorken bile Cam 'den gelen sesi duymaya devam edersiniz. Böylece telefonunuzu başka amaçlarla kullanırken çocuğunuzun sesini dinleyebilirsiniz.

## Video Kalitesi

Cam, yüksek kaliteli bir akış sağlayarak 1080p'ye kadar video akışı görüntüleyebilir. Ancak video akış kalitesi çeşitli faktörlerden etkilenebilir. Cam, tutarlı bir akış sağlamak için akış kalitesini otomatik olarak ayarlayan "Auto" (Otomatik) modunda çalışacak şekilde ayarlanmıştır. İsterseniz başka bir görüntüleme çözünürlüğü (1080p, 480p veya 360p) seçebilirsiniz. Owlet, tutarlı bir akışı sağlayabilmek için Otomatik ayarını kullanmanızı önerir.

- Cam'ınızın sağladığı akış kalitesini görmek için "Auto" (Otomatik) kelimesinin soluna üç kez dokununuz.

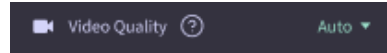

## Oda Durumu

Varsayılan olarak, Cam yayınının altındaki durum, sıcaklık ve nem seviyelerine bağlı olarak odanın konforsuz olup olmadığına dair bilgi verir. Durum, Notifications (Bildirimler) altında varsayılan veya özelleştirilmiş konfor ayarlarını yansıtacak şekilde güncellenir.

- Room is Comfortable (Oda Konforlu)
- Room is Uncomfortable (Oda Konforlu Değil)

## Sıcaklık ve Nem Ölçümleri

Owlet Cam, sıcaklığı Fahrenheit veya Celcius cinsinden, nemi ise yüzde olarak görüntüleyen yerleşik bir sıcaklık ve nem sensörüne sahiptir. Ölçümlerin doğru olmasını sağlamak için termostatın odanın neresine yerleştirileceğini belirleyin.



# Bildirimler ve Video Klipler

## Cam Bildirimleri

Bunlar, Cam 'niz belirli bir olay (ağlama, ses, hareket) algıladığında gönderilen bildirimlerdir. Gönderilebilecek üç bildirim türü şunlardır:

- **Ağlama Algılama:** Cam ağlama sesi algıladığında bildirim alırsınız.
- **Ses Algılama:** Odada ayarlanan eşik üzerinde bir ses algılandığında bildirim alırsınız.
- **Hareket Algılama:** Cam kadrajında hareket algılandığında bildirim alırsınız.
- **Oda Konforu/Uyku Yardımı:** Oda sıcaklığı veya nem seviyeleri belirtilen eşik değerlerinin dışında olduğunda bildirim alırsınız.

## Eşikler

- **Ağlama, Ses ve Hareket:** Ayarlarda, bir bildirim tetiklenmesi için gereken hassasiyeti ayarlamanıza olanak tanıyan eşikler bulunur.


- **Oda Konforu/Uyku Yardımı:** Çevresel ayarınıza uygun, özelleştirme olanağı sunan ayarlanabilir aralıklara sahiptir.

**Sıcaklık:** 5 derecelik artışlarla 4 °C (40 °F) - 32 °C (90°F) arasında herhangi bir sıcaklığa ayarlanabilir.

Varsayılan değer 16 °C (60 °F) ve 28 °C (80 °F) olarak ayarlanmıştır.

*Cam, sıcaklığı Santigrat cinsinden ölçer ve bu ölçüm Fahrenheit'a dönüştürülür. Bu nedenle ölçümlerde ortalama 1-3 derece hata olabilir.*

**Nem:** Varsayılan değerler %10-90 RH (Bağıl Nem) aralığındadır.

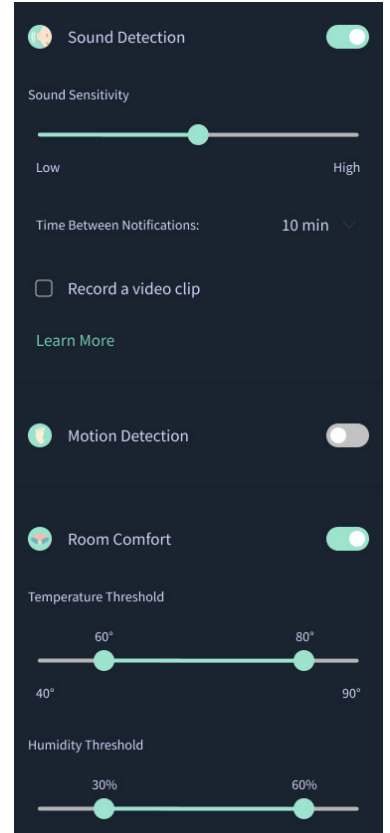

## Bildirimler Arasındaki Süre

Ne sıklıkta bildirim almak istediğinizi belirlemek için bu ayarı kullanın. Belirtilen bildirimler ayarlanan süre içinde mobil cihaza yalnızca bir kez gönderilir.

- Örneğin bildirimler arasındaki süreyi 5 dakika olarak ayarlarsanız bebeğinizin ağladığına dair bildirimleri bu 5 dakika içinde yalnızca bir kez alırsınız. 6. dakikada bebeğiniz ağlamaya devam ediyorsa bir bildirim daha gönderilir.


Bu süre, ağlama, ses ve hareket için 1 dakika ile 1 saat aralığında ayarlanabilir. Oda konfor seviyeleri 30 dakikada bir, 60 dakikada bir veya 24 saatte bir şekilde ayarlanabilir.

Eşikler ve bildirimler arasındaki süre, hesaplama ilişkili tüm mobil cihazlarda aynı olacaktır.

## Cam Bildirimleri - AÇIK

Belirli bir mobil cihazın bildirim alabilmesi için ana sayfada Cam Bildirimleri'nin AÇIK olarak etkinleştirilmesi gerekir.

Böylece Cam'a birden fazla cihaz bağlanabilir. Ancak yalnızca bildirim almayı seçen cihazlara bildirim gönderilir.

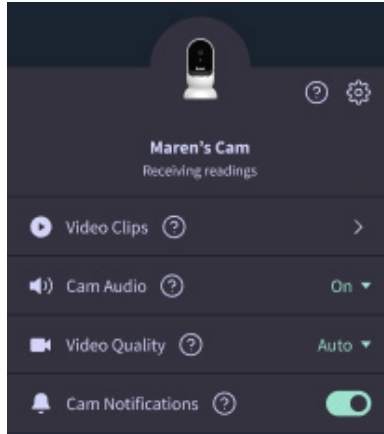

## Video Klipler

Bebek odasında ses, hareket veya ağlama algılandığında video klip çekilebilir. Klipler Owlet Uygulaması'nda 7 gün boyunca saklanır ve mobil cihazınıza kaydedilebilir. Video klipler olaydan birkaç dakika öncesini ve sonrasını kaydeder.

- Video klipler, Cam ağlama, ses veya hareket algıladıktan itibaren bu olay son bulana kadar kaydedilebilir.

## Video Klipleri Oynatma

Tercih edilen video klibe tıklayın. Video tam ekran olarak görüntülenir ve dikey moda döndürülebilir.

Klibi oynatabilir, duraklatabilir, hızlı ileri ve geri sarabilirsiniz (~4 saniye).

Sesi kapatabilir, tam ekrana geçebilir veya diğer seçenekler için paylaş düğmesine basabilirsiniz.

Paylaş düğmesi size şu seçenekleri sunar:

- Videoyu hesaptan silme
- Videoyu paylaşma
- Videoyu cihazınıza kaydetme



## Video Klip Yönetimi

- **Kullanılabilirlik:** Video klipler, çekildikten sonraki 7 gün boyunca kullanıcılar tarafından görüntülenebilir.
- **Sıralama ve Filtreleme:** Kliplerinizi türe göre sıralayabilir ve filtreleyebilirsiniz.
- **Video klipleri silme:** İşinize yaramayan klipleri silebilirsiniz.

Bir video klipi silmek için "Select" (Seç) düğmesine basın ve silmek istediğiniz videoları seçin.


Paylaş düğmesine tıklayarak video klipi tam ekran görünümünden de silebilirsiniz.

Video klipler uygulamadan silindiğinde, aynı hesaba giriş yapan diğer kullanıcılar da bu video kliplere erişimi kaybeder.

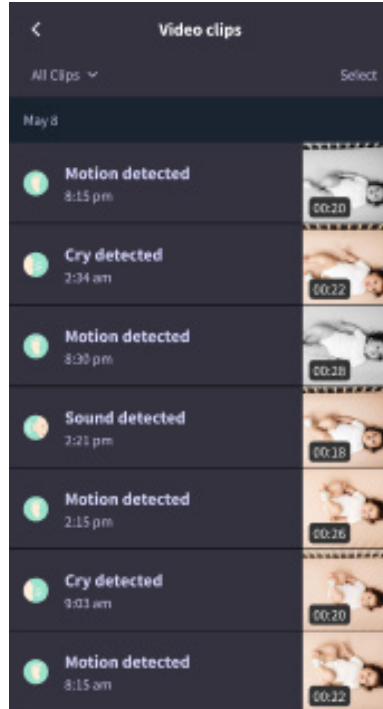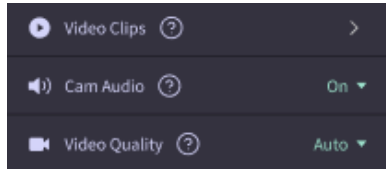

## Geçmiş

Video klipler History (Geçmiş) sekmesinde de bulunabilir ve o günle ilişkili diğer tüm geçmiş görünümüne dahil edilir. Liste ögesi görünümüne bastığınızda, o gün çekilen tüm video kliplerin listesi gösterilir.

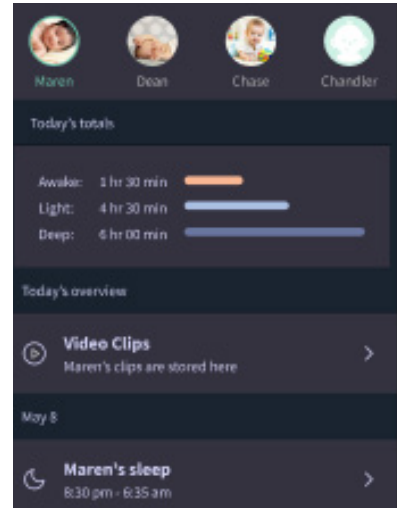

# Cam yayınının görünmesiyle ilgili sorun mu yaşıyorsunuz?

Cam yayınızdaki bu simgeleri gördüğünüzde izlemeniz gereken bazı adımlar aşağıda verilmektedir.

## Mobil cihazınız çevrimdışı

Bu hata, mobil cihazınızın şu anda Wi-Fi veya hücresel ağ üzerinden internete bağlı olmadığı anlamına gelir.


Mobil cihazınızın uçak modunda olmadığından emin olun.

## Owlet Cam çevrimdışı

Bu mesaj Owlet Cam'in internete bağlı olmadığını gösterir. Aşağıdakileri kontrol ederek bu durumu doğrulayabilir veya sorunu çözebilirsiniz:

### Cam'in güce bağlı olduğunu doğrulayın.

- Ünitinin fişinin takılı ve açık olduğundan emin olun.
- Fişi çıkarıp 30 saniye bekledikten sonra Try Again (Tekrar Dene) düğmesine tekrar basarak gücü kapatıp açın.

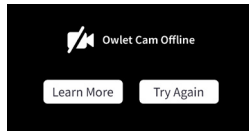

Uygulamadan çıkış yapıp tekrar giriş yapın. Tekrar giriş yaptığınızda bağlantının kurulup kurulmadığına bakın.

Wi-Fi bağlantınızın çevrimiçi ve yayında olup olmadığını kontrol edin.

- Telefonunuz da aynı Wi-Fi ağına bağlıysa hücresel servisleri kapatın ve internete bağlanıp bağlanmadığınızı kontrol edin.
- Wi-Fi ağının düzgün bir şekilde yayını yapıp yapmadığını veya yeni bir kablosuz bağlantının bulunduğu bir alanda olup olmadığını kontrol edin.

## Yeniden Eşleştirme Talimatları

Cam'in onarılması, Cam'in Wi-Fi bağlantısını sıfırlar.

Account (Hesap) sekmesinde MyOwletDevices seçeneğinden (Cam'inizi seçin), Wi-Fi, + Connect to new network (Yeni ağa bağlan) öğesine gidin ve talimatları izleyin.



## Yeniden Kaydettirme Talimatları

Cam'in yeniden kaydedilmesi, Cam cihazının hesaptan ve Owlet arka uç hizmetlerinden kaldırılmasına ve Wi-Fi bağlantılarının silinmesine neden olur.

Account (Hesap) sekmesine gidin, Kamera'yı ve ardından "Remove this device" (Bu cihazı kaldır) seçeneğini belirleyin.

Account (Hesap) sekmesinde ekranı aşağıya kaydırıp +Add Owlet device (Owlet cihazı ekle) seçeneğini belirleyin. İstemleri takip edin.




# Cam Ayarları ve Hesap Bilgileri




Owlet Uygulaması, Cam yayınınızı görüntülemekten daha fazlasını yapmanızı sağlar. Hesap sekmesinde hesabınızda gezinebilir, diğer Cam ayarlarına ve genel bilgilere göz atabilirsiniz.

Account (Hesap) sekmesindeki Owlet Cihazları listesinden Cam'ınızın seçtiğinizde aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Cam'ınızın adını veya Cam'ın atandığı çocuk profilini değiştirebilirsiniz.
- Bildirim ayarlarınıza erişebilirsiniz.
- Yeni bir Wi-Fi ağı ekleyebilir veya Wi-Fi bağlantınızı yeniden eşleştirebilirsiniz.
- LED Durum ışıklarınızı açabilir/kapatabilirsiniz.
- Cam'ınızın Seri Numarasını, Ürün Yazılımı Sürümünü ve Wi-Fi gücünü öğrenebilirsiniz.
- Cam'ınızı hesabınızdan kaldırabilir ve silebilirsiniz.

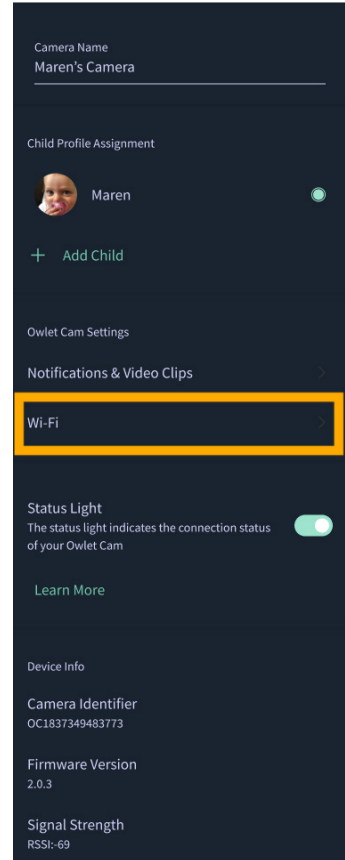

# Ek

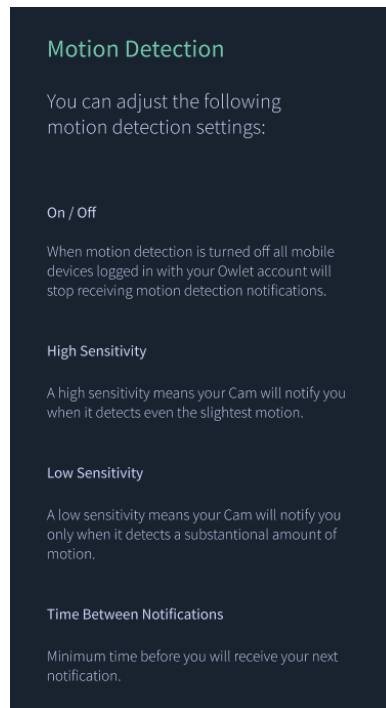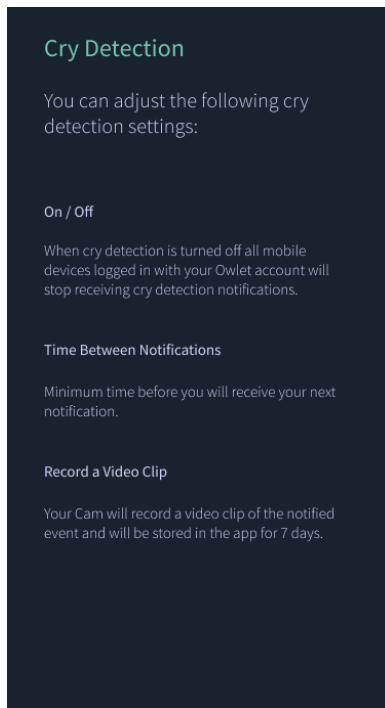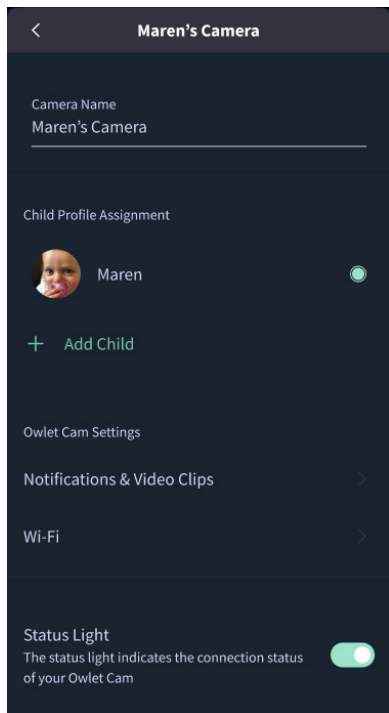

## Sound Detection

You can adjust the following sound detection settings:

### On / Off

When sound detection is turned off all mobile devices logged in with your Owlet account will stop receiving sound detection notifications.

### High Sensitivity

A high sensitivity means your Cam will notify you when it detects even the slightest noises.

### Low Sensitivity

A low sensitivity means your Cam will notify you only when it detects a substantial amount of noise.

### Time Between Notifications

Minimum time before you will receive your next notification.

## Video Clips

The Owlet Cam 2 captures video clips when sound, motion, or cry detection events occur. You can select which events you want to trigger a video clip, and when that event occurs, it will capture a few seconds before and after the event so you have more visibility and insight into what is happening with Baby.

Video clips will only be captured when notifications are enabled on at least one device, and will be available to view for 7 days for all devices associated with the account. Clips can be saved and downloaded to your device in order to share with others.

Once a clip is deleted by a user it is removed from the account and cannot be recovered.

## Room Comfort

You can adjust the following temperature/humidity detection settings:

### On / Off

When room comfort detection is turned off all mobile devices logged in with your Owlet account will stop receiving room comfort notifications.

### Room Temperature & Humidity

Your cam will notify you with a Sleep Assist prompt when the temperature or humidity settings go beyond the thresholds that are set.

### Time Between Notifications

Minimum time before you will receive your next notification.

### Record a Video Clip

Your Cam will record a video clip of the notified event and will be stored in the app for 7 days.

# UYARI:

## Boğulma Tehlikesi!



Çocukların kablolar nedeniyle BOĞULDUGU vakalar yaşanmıştır. Bebek yatağına 1 metre (3 fit) yakında kullanırken mutlaka koruyucu kılıf kullanın. Her kullanımdan önce kablounu çocuğunuzun göremeyeceği bir yerde olduğundan emin olun. Koruyucu kılıf hasar gördüyse veya bozulduysa kullanmayı hemen bırakın. Kabloadaki ve koruyucu kılıftaki etiketi çıkarmayın.

### ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

- UYARI: Owlet Cam tıbbi bir cihaz değildir. Tıbbi cihaz olarak veya tıbbi bir cihazın yerine geçecek şekilde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Hastalık veya sağlık durumunu tanılamak, iyileştirmek, tedavi etmek, hafifletmek veya önlemek ya da anatomiyi veya herhangi bir fizyolojik süreci araştırmak, değiştirmek veya modifiye etmek için kullanılmaz ve bu amaçlara yönelik değildir.
- Yalnızca iç mekanda kullanın. Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için bu ürünü suya veya neme maruz BIRAKMAYIN. Monitörü suya yakın yerlerde (küvet, lavabo vb.) KULLANMAYIN veya suya batırmayın.
- Bu monitörün kullanılması, uygun yetişkin/ebeveyn gözetiminin yerine geçemez. Bu monitör ebeveynleri çocuğunuz sessiz aktivitelerine dair uyaramaz. Bu nedenle çocuğunuzun aktivitelerini düzenli aralıklarla kontrol etmelisiniz.
- Ürünü KESİNLİKLE sökmeye çalışmayın. Bu işlem tehlikelidir ve garantinin geçersiz kalmasına neden olur.
- Kullanıcı monitöre bakım/onarım yapmaya çalışmamalıdır.
- Yalnızca bu ürünle birlikte verilen adaptörü ve kabloları kullanın. Yanlış adaptör kutupsallığı veya voltajı ürüne ciddi şekilde zarar verebilir.
- Kablounun dolaşmasını ve aşırı ısınmayı önlemek için uzatma kablosu KULLANMAYIN.
- Çalışırken dokunulduğunda adaptörde hafif bir sıcaklık hissedilebilir. Bu normaldir.
- Uzun süre kullanmayacasanız AC adaptörünü duvar prizinden MUTLAKA çekin.

- Duvar prizi plakalarının anormal şekilde sıcak olup olmadığını kontrol edin. Sıcaksa kabloları hemen bu prizlerden çekin. Adaptörün gevşek kalmaması veya açığa tel bulunmaması için tüm duvar prizlerinin iyi durumda olduğundan emin olun. Açığa tel olmadıysa emin olmak için yetkin ve lisanslı bir elektrik teknisyenine kontrol ettirin.
- Adaptörü/duvar prizini çocuğunuz üzerine basmak ve/veya tehlikeli bir şeye erişmek için kullanabileceği şekilde bir pencerenin altına YERLEŞTİRMEYİN.
- Montajın yetişkin kişiler tarafından yapılması gerekir. Montaj sırasında küçük parçaları çocuklardan uzak tutun. Ürünü ambalajından çıkarırken dikkatli olun.
- Bu ürün oyuncak değildir. Çocukların ürünle oynamasına İZİN VERMEYİN.
- Monitör, FCC tarafından yönetilen frekanslar üzerinden şifreli iletim kullanır. Wi-Fi yönlendiricinizi parola ile korumayı unutmayın.

### EK GÜVENLİK TALİMATLARI

- HAVALANDIRMA: Hava deliklerinin üzerini KAPATMAYIN. Yatağa, kanepeye, halıya veya benzer bir yüzeyin üzerine KOYMAYIN. Hava akışını engelleyebilecek şekilde kitaplık veya dolap içine KOYMAYIN.
- ISI: Monitör; radyatör, kalorifer ızgarası, ocak veya ısı üreten diğer cihazlar gibi ısı kaynaklarından uzak bir yere yerleştirilmelidir. Ayrıca bileşenler doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
- GÜÇ KABLOSU KORUMASI: Güç kablosu, üzerine basılmayacak veya herhangi bir nesne tarafından üstünden veya yanından sıkıştırılmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Kablounun özellikle fiş bölümüne ve monitörden çıktığı kısma dikkat edilmelidir.

### SINIRLI GARANTİ

Owlet, ürünlerinin arkasında gururla durmaktadır. Garantilerimizi şu adreste bulabilirsiniz:

<https://owletcare.com/pages/warranty>

### FCC UYGUNLUK BEYANI

Bu üniteye uygunlukta sorumlu tarafın açıkça onaylamadığı değişiklik veya modifikasyonlar yapılması, kullanıcının bu ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılar. Lütfen YALNIZCA ürünle birlikte verilen güç adaptörünü kullanın. Aksi halde

sınırlı garanti geçersiz kalabilir. Bu ekipman test edilmiş ve FCC kurallarıyla uyumludur. Bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, konut tipi kurulumlarda zararlı girişime karşı makul düzeyde koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Ekipman, üreticinin talimatlarına uygun olarak kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde radyo iletişiminde zararlı girişimlere neden olabilir.

### WEE UYGUNLUK BEYANI

Owlet, atık elektrikli ve elektronik ekipmanlara (WEEE) ilişkin 2012/19/EU sayılı direktifin gerekliliklerini karşılama konusunda kararlıdır. Owlet ürünlerinin AB ve Birleşik Krallık'ta uygun şekilde atılması hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen owletcare.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

### UYGUNLUK BEYANI

Owlet Baby Care, işbu belge ile Owlet Cam 'nin 2014/53/EU sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir:

<https://owletcare.com/pages/ce-compliance>

### FREKANS ARALIĞI VE MAKSİMUM ÇIKIŞ

2412-2472 MHz (0,0249 Watt çıkışı)

ABD Patent Numaraları: D864147 ve D864148. Diğer patentler beklenmemektedir.

### IC : 21386-OC2A

Bu cihaz, Industry Canada lisansından muaf RSS standartlarına uygundur. Çalıştırma aşamadaki iki koşulu tabidir: (1) bu cihaz parazitlere neden olamaz ve (2) bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler dahil olmak üzere her türlü girişimi kabul etmemelidir.



Siber güvenlik olaylarını tespit etme

Owlet'te siber güvenlik en öncelikli konulardan biridir. Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin sürekli güvenliğini sağlamak için özel bir ekibe sahibiz. Şüphelenilen sorunları araştırabilmemiz için ürünlerimizde günlük kaydı özelliği etkinleştirilmiştir. Bir sorun olduğundan şüpheleniyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin: <https://support.owletcare.com/hc/en-us/categories/360003108872>

Cihazınızı güncel tutma

Telefonunuz, bilgisayarınız ve bizim uygulamamız gibi uygulamalarınız dahil olmak üzere, cihazlarınızı üretici güncellemeleriyle güncel tutmanız önemlidir. Kullanıma sunulan güncellemeleri indirdiğinizden ve mevcut en son sürümü kullandığınızdan emin olun. Cihazımızda bir güvenlik açığı bulunursa yeni sürümlerde güvenlik güncellemeleri yayınlanacaktır. Lütfen Owlet uygulamanızın da güncel olduğundan emin olun.

Olası güvenlik açığı endişeleri, Owlet'in Güvenlik Açığı Açıklama Politikası'nda belirtilen şekilde bildirilebilir: <https://owletcare.com/pages/vulnerability-disclosure-policy>

Güvenlik güncellemeleri

Cihazınızın güvenliğinin sağlanması için gereken veya rutin güvenlik güncellemeleri en geç 31 Aralık 2027 tarihine kadar cihazınıza sağlanacaktır.

Owlet Baby Care, Inc., işbu belge ile Owlet Cam 'nin 2014/53/EU sayılı direktife ve Birleşik Krallık PSTT'ye (2022) uygun olduğunu beyan eder. AB ve Birleşik Krallık Uygunluk Beyanı'nın tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: <https://owletcare.com/pages/ce-compliance>

